

ポケレチライト

ORT-Y

ポケレチライト
ORT-Yは
次のような検査に
大変便利です。

1

両眼視機能検査

バゴリーニテスト

2

固視検査

カバーテスト

3

眼位・視野検査

ヒルシュベルグ法、対座法、色視野など、
付属の赤キャップを使用します。

4

屈折検査（検影法）

簡易的なレチノスコピー検査。
レチノヘッドを取り付けて使用します。



レチノヘッド ペンライト

ポケレチライト
ORT-Yの
形状特長

患者様に直接電球の光を見ていただくことで実施しやすいヒルシュベルグ法や眼位検査では、ORT-Yを患者様の方向に向けて保持して使用します。また、バゴリーニテストでは、小光点の特性を活かして線条光の確認を行うことができます。さらに、カバーテストなど固視目標を用いる検査では、強い光が妨げとならないよう、本体を立てて使用するなど、検査目的に応じた使い分けが可能です。



(実物大)

仕 様

内 容	ORT-Y 本体 単3形アルカリ乾電池 ×2 赤キャップ ×3 電球（電池）交換レンチ ケース
電 球	L-70 (3V, 0.9W)
本体寸法	Φ24mm×195mm (H)
本体質量	120g