

ポケレチライトORT-Y

ポケレチライトORT-Yは
次のような検査に大変便利です。

1 両眼視機能検査

バゴリーニテスト

2 固視検査

カバーテスト

3 眼位・視野検査

ヒルシュベルグ法、対座法、色視野など
付属の赤キャップを使用します。

4 屈折検査(検影法)

簡易的なレチノスコーピー検査。
レチノヘッドを取り付けて使用します。

推薦のことば

福岡市 医療法人松井仁会大島眼科病院 検査部長
認定視能訓練士 山田敏夫 (日本ロービジョン学会評議員)

私たち視能訓練士にとって使いやすく、また視能訓練士の使い勝手を考えたペンライトです。

ポケレチライトORT-Yは先端に光る部分が顔を出している小光点構造なので、バゴリーニテストでの線条の光がはっきりしており、患者様からの応答もスムーズです。また付属についている赤キャップを電球先端につけると対座法による視野検査、特に神経眼科的な比較暗点発見に大変便利です。この赤キャップは使わないときはなくさないようにレチノヘッドに付けておく配慮がされています。またこのレチノヘッドを先端に取り付ければ眼科にとって基本的で大切な簡易的スポットレチノスコープとして屈折検査にも対応できます。カバーテストやヒルシュベルグ法では小型軽量なのでスムーズな動きに適應します。

ポケレチライトORT-Yは、私たち視能訓練士にとって使いやすく、患者様にとってもやさしく検査ができる世界で初めてできた視能訓練士専用のペンライトなのです。



(実物大)

ポケレチライトORT-Yの 形状の特長



患者様に直接電球の光を見てもらった方がやりやすいヒルシュベルグ法や眼位検査には、ORT-Yを患者様に向けて保持します。

また、バゴリーニテストなど小光点の特性を生かして線条の光を確認してもらったり、カバーテストなど固視目標の使用では、強い光がかえって邪魔にならないよう立てて使うなど、目的に応じた使い方ができます。



ペンライト



レチノヘッド

仕様

● 内容	ORT-Y本体 単三形アルカリ乾電池×2 赤キャップ×3 電球（電池）交換レンチ、 ケース
● 電 球	L-70 (3V、0.9W)
● 本体寸法	Φ24mm×195mm (H)
● 本体質量	120g